



HDR CHECKLIST

Name _____ HN. _____ Diagnosis _____ Dr. _____

Fraction number	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5
Date					
Time					
ก่อนใส่แร่					
1. ตรวจสอบตำแหน่ง Source (PVT) : Daily QA	☐	☐	☐	☐	☐
2. ทดสอบ Door interlock : Daily QA	☐	☐	☐	☐	☐
3. ตรวจสอบชื่อและนามสกุลผู้ป่วย	☐	☐	☐	☐	☐
4. ตรวจสอบ Source position and dwell time ที่เครื่องกับแผนการรักษา Treatment time	☐	☐	☐	☐	☐
5. จัดเตียงผู้ป่วยโดยหันด้านที่มี applicator มาทางด้านนอกและขอบอยู่ ภายในเส้นที่พื้น	☐	☐	☐	☐	☐
6. ต่อ Transfer guide tube กับเครื่องให้ตรงตาม Channel number - Applicator : - Channel :	☐	☐	☐	☐	☐
7. กดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนขวาของแป้นเสียบ (Quick connect button) ต้องปรากฏไฟสีเขียวแสดงทุก Channel ที่ต่อกับเครื่อง	☐	☐	☐	☐	☐
8. ปิดกุญแจเครื่องอยู่ที่ตำแหน่ง Unlock (12 นาฬิกา) และล็อกล้อเครื่อง	☐	☐	☐	☐	☐
9. นำถั่วตะกั่วพร้อม forceps และกรรไกรวางข้างเครื่องใส่แร่ แล้วเปิด ฝาทิ้งไว้	☐	☐	☐	☐	☐
10. ดึงสลักสีดำด้านขวาของเครื่องให้ตั้งขึ้น (พร้อมที่จะหมุน source กลับเข้า ที่ได้ในกรณีเกิด source ค้าง)	☐	☐	☐	☐	☐
11. นำ survey meter มาวัดรอบๆ ตัวผู้ป่วย (ต้องเช็ค battery ก่อนทุกครั้ง) Dose rate	☐	☐	☐	☐	☐
12. คนสุดท้ายที่ออกจากห้องกดยุ่ม Last man out	☐	☐	☐	☐	☐
13. ปิดประตูห้อง	☐	☐	☐	☐	☐
หลังใส่แร่					
1. นำ survey meter วัดรอบๆ ตัวผู้ป่วยอีกครั้ง Dose rate	☐	☐	☐	☐	☐
2. ปิดกุญแจเครื่องให้อยู่ในตำแหน่ง Lock	☐	☐	☐	☐	☐
3. เก็บสลักสีดำด้านขวาของเครื่องกลับเข้าที่	☐	☐	☐	☐	☐
Checked by					